

Instrucciones recomendadas para la autorrecolección en entornos sanitarios

MUESTRA NASAL ANTERIOR DE AMBOS ORIFICIOS NASALES

IVD

For in vitro diagnostic use


Rx Only

For prescription use only

For use under Emergency Use Authorization (EUA) only

visby medical™

Nota: Hisope ambos orificios nasales con el mismo hisopo.

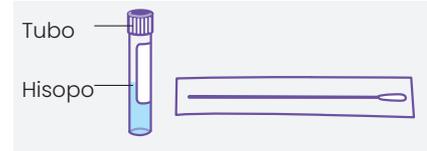

Paso 1 Prepare los materiales

Lávese las manos. Póngase un nuevo par de guantes. Identifique su tubo e hisopo secos.



Paso 2 Desenvuelva el hisopo

Sostenga el mango del hisopo en la mano, colocándolo entre el pulgar y el dedo índice.
⚠ No toque la punta blanda del hisopo con el dedo ni con ninguna superficie. Si lo hace, comience nuevamente con un kit nuevo.




Paso 3 Introduzca el hisopo

Coloque el dedo índice por encima del borde del orificio nasal e introduzca suavemente la punta blanda del hisopo en un orificio nasal justo hasta que la punta blanda deje de ser visible (de ½ a ¾ de pulgada o de 1 a 1,5 cm).
⚠ Si siente dolor, deténgase inmediatamente.




Paso 4 Recolecte la muestra del primer orificio nasal

Gire el hisopo lentamente haciendo al menos cuatro círculos alrededor de la pared interior del orificio nasal. Esto debería tomar aproximadamente 10-15 segundos por orificio nasal. Retire el hisopo lentamente.
⚠ Asegúrese de que la punta blanda no toque nada después de retirarla del orificio nasal.

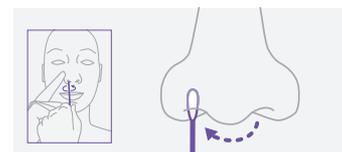


Paso 5 Recolecte la muestra del otro orificio nasal

Utilice el mismo hisopo y repita los pasos 3 y 4.
⚠ Mantenga el hisopo en la mano durante el paso 5 y asegúrese de que la punta blanda no toque nada después de retirar el hisopo del orificio nasal.

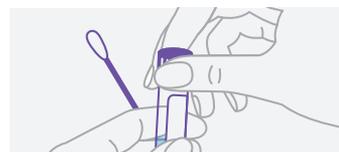

Paso 6 Abra el tubo

Desenrosque cuidadosamente la tapa, asegurándose de que la punta blanda del hisopo no toque nada. Deje la tapa.

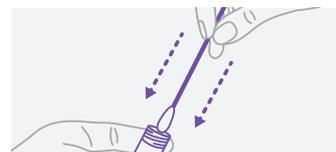

Paso 7 Introduzca el hisopo

Mantenga la abertura del tubo alejada de usted e introduzca cuidadosamente la punta blanda del hisopo en el tubo.



Paso 8 Guarde el hisopo

Una vez que la punta esté cerca del fondo, rompa el mango del hisopo en el punto de rotura del hisopo doblándolo hacia adelante y hacia atrás. El hisopo debe asentarse holgadamente en el tubo para poder enroscar la tapa.
Deseché el mango del hisopo inmediatamente.



Pasa 9 Devuelva el tubo

Vuelva a enroscar la tapa firmemente para evitar la contaminación. Lávese las manos con agua y jabón.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

⚠ Los usuarios deben leer el procedimiento completo de recolección antes de realizar la autorrecolección de muestras. No introduzca el hisopo en exceso.

PS-300684-SPANISH Rev A-02/2024

www.visbymedical.com