

الخطوة 1 فتح عدة الأدوات



اغسلي يديك واخعي ملابسك من الخصر إلى أسفل.

افتحي عدة أدوات جمع العينة المهبلية "Visby"، وضعي الأنبوب جانبًا.

الخطوة 2 إزالة مغلف المسحة



انزعي مغلف المسحة.

⚠ لا تلمسي الطرف اللين من المسحة بإصبعك ولا بأي سطح آخر. ولو فعلت ذلك أو لم يكن للمسحة طرف، تخلصي منها وعودي الكرة باستخدام عدة أدوات جديدة.

الخطوة 3 مسك المسحة



أمسكي المسحة بيدك بوضعها بين إبهام وسبابة يديك.

أدخلي الطرف المرن من المسحة بحرص حوالي 5 سم إلى داخل فتحة المهبل.

الخطوة 4 جمع العينة



لفي المسحة برفق مدة 10 ثوان - 30 ثانية، مع الحرص على لمس المسحة جدران المهبل.

⚠ أخرجي المسحة وأبقِها في يدك أثناء الخطوة 5.

الخطوة 5 افتحي الأنبوب



افتحي الغطاء برفق بلفه إلى أعلى مع الحرص على ألا يلمس طرف المسحة المرن أي شيء. وضعي الغطاء جانبًا.

الخطوة 6 أدخلي المسحة



أمسكي فتحة الأنبوب بعيدًا عنك وأدخلي طرف المسحة المرن إلى داخل الأنبوب.

الخطوة 7 انقري فوق المسحة



انقري فوق المسحة برفق على قاع الأنبوب مدة 15 ثانية. تجنبي أي تتأثر لرذاذ. أخرجي المسحة من الأنبوب وتخلص منها كما ينبغي.

الخطوة 8 ارجعي الأنبوب



لفي الغطاء على الأنبوب لإغلاقه بإحكام.

اغسلي يديك بالصابون والماء. ارجعي الأنبوب إلى مقدم رعايتك.

معلومات مهمّة

للاستخدام مع اختبار الصحة الجنسيّة من "Visby Medical"

يُنظي على المستخدم من قراءة إجراءات الجمع كاملة قبل إجراء جمع العينة ذاتياً. يرجى الرجوع إلى تعليمات استخدام عدة اوارات جمع العينة المهبليّة لمزيد من المعلومات.

قد تحتوي عدة اوارات جمع العينة هذه على مواد مهيجّة. لا يُنظي محتويات الأنبوب إن تثاررت محتويات الأنبوب على عينيّك، فاسطفي عينيّك بالماء. إن تثاررت المحتويات على جلدك، اغسليه بالصابون والماء، وإن بقيت المواد المهيجّة، أخطري مقدم رعاية صحيّة.

يُنظي عدم جمع العينة إن استخدم ما يلي على المنطقة ألتامليّة في خلال مدة 48 ساعة الأخريرة: المنظفات المهبليّة، أو الفسول، أو المرطبات، أو المقاديل المهبليّة، أو المرطبات المهبليّة، أو مضادات التعرق، أو المعطرات، أو بخاخ العناية الألتويّة الصحيّة.

لا تدخل المسحة إلى داخل المهبل أبعد من 5 سم.

إن كنت حاملاً، يرجى اختبار مقدم رعايتك الصحيّة.

قبل جمع عينة المسحة المهبليّة، أخبري مقدم رعايتك الصحيّة، إذا كنت تعانين من:

- ألم الحوض مؤخرًا
- ألم أثناء الجماع
- وجود إفرازات مهبليّة غير معتادة أو رائحة كريهة

قد تكون هذه الأعراض بسبب مرض الحوض الألتاهي (PID). الفحص والمعالج المبكر لمرض الحوض الألتاهي يمكن أن يساعد في الوقاية من عدم الخصوبة والحمل المتأبذ (خارج الرحم) المرتبط بمرض الحوض الألتاهي.

شركة Visby Medical, Inc
3010 North First Street
San Jose, CA 95134



Rx Only



لمزيد من المعلومات، ارجعي إلى تعليمات استخدام عدة اوارات جمع العينة المهبليّة للصحة الجنسيّة "Visby Medical"
(https://www.visby.com/vaginal-collection-ifu/).



يمكن طلب نسخة مطبوعة من عدم عملاء Visby Medical على رقم 833-468-4729 أو support@visby.com