



### 第 1 步 打开试剂盒

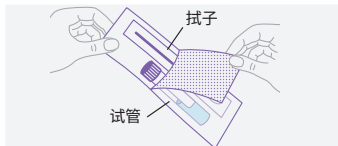

请先洗手，然后脱掉腰部以下的衣物。

打开 Visby 阴道标本采集试剂盒，将试管放在一边。

### 第 2 步 打开拭子包装

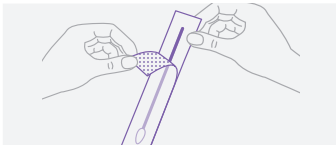

打开拭子包装。

**⚠️** 不要用手指触摸拭子的软头或任何表面。如果您触摸了拭子软头或任何表面，或者如果拭子没有软头，请丢弃该拭子，并使用新试剂盒重新开始采集。

### 第 3 步 握住拭子



用拇指和食指夹住拭子，将其握在手中。

小心地将拭子的软头插入阴道口中约 2 英寸。


### 第 4 步 采集样本



轻轻地旋转拭子 10-30 秒，确保拭子接触阴道壁。


**⚠️** 在第 5 步中，取出拭子并用手握住。

### 第 5 步 打开试管

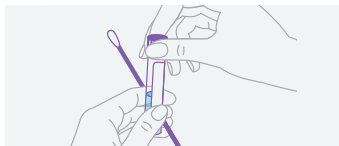


小心地拧开盖子，确保拭子的软头没有接触到任何东西。把盖子放下。

### 第 6 步 插入拭子

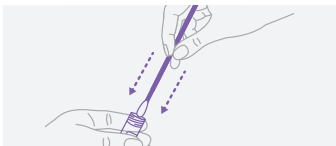

保持试管口远离自己，小心地将拭子的软头插入试管。

### 第 7 步 轻拍拭子

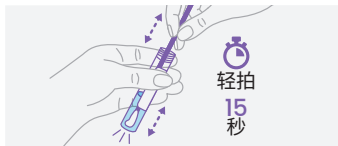

将拭子靠在试管底部轻拍 15 秒。避免飞溅。将拭子从试管中取出并以适当方式丢弃。

### 第 8 步 放回试管



将盖子在试管上拧紧。

用肥皂和水洗手。将试管交回护理人员。

## 重要信息

### 与 Visby Medical Sexual Health 检测配合使用

 用户应首先阅读完整的采集程序，然后自行采集标本。更多信息请参阅阴道标本采集试剂盒使用说明。

 本标本采集试剂盒可能含有刺激物。请勿吞下试管的内容物。如果试管的内容物溅入眼内，请用水冲洗眼睛。如果内容物溅到您的皮肤上，请用肥皂和水清洗。如果刺激持续存在，请通知医疗保健提供者。

 如果在过去 48 小时内有在生殖器区域使用过以下产品，不要采集样本：灌洗器、洗液、润滑剂、阴道湿巾、阴道保湿剂、止汗剂、除臭剂或女性卫生喷雾。

 拭子插入阴道不得超过约 2 英寸。

 如果您怀孕了，请告知您的医疗保健提供者。

 在采集阴道拭子标本之前，如有以下情况请告知您的医疗保健提供者：

- 近期盆腔疼痛
- 性交疼痛
- 阴道分泌物异常或有异味

这些症状可能是由盆腔炎 (PID) 引起的。及时诊断和治疗 PID 有助于预防与 PID 相关的不育和异位妊娠。



Visby Medical, Inc.  
3010 North First Street  
San Jose, CA 95134



有关更多信息，请参阅 Visby Medical Sexual Health 阴道标本采集试剂盒使用说明  
(<https://www.visby.com/vaginal-collection-ifu/>)。

打印的副本可致电 Visby Medical 客户支持部门索取，电话：1-833-468-4729 (1-833-Govisby) 或发送电子邮件至 [support@visby.com](mailto:support@visby.com)。